


# Kolvspärr - Instruktion för användning vid beredning av M-M-RvaxPro®

# M-M-RvaxPro - Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund

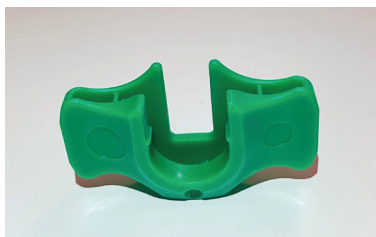

Kolvspärr är ett återanvändningsbart hjälpmedel vid beredning av M-M-RvaxPro, för att förhindra att kolven åker ut vid beredning. Den har en smalare öppning upptill, en bredare öppning nedtill. **Tänk på att inte slänga kolvspärren efter användning utan återanvänd den till nästa gång.**

Så här applicerar du kolvspärren på sprutan:

## Steg 1

För över kolvspärren på sprutans glasvingar med den smalare öppningen mot sprutkolvens sida.



## Steg 2

Kolvspärren ska klickas på plats.



## Steg 3

Förbered och administrera sprutan enligt rekommendation.



## Steg 4

Efter användning, se till att avlägsna kolvspärren för att kunna återanvända den med nästa spruta.

